

WICHTIGE INFORMATIONEN

- System gerade & stabil am Patientenbett befestigen
- Sensor oder Sensortasche am Beutel darf nicht nass werden




1 SYSTEM VORBEREITEN

1.1 Sensor in Steuereinheit einschieben, bis Sensor einrastet (spürbar & hörbar)



1.2 Sensor vollständig in Urinbeutel einschieben bis seitliche Klipps einrasten (spürbar & hörbar)

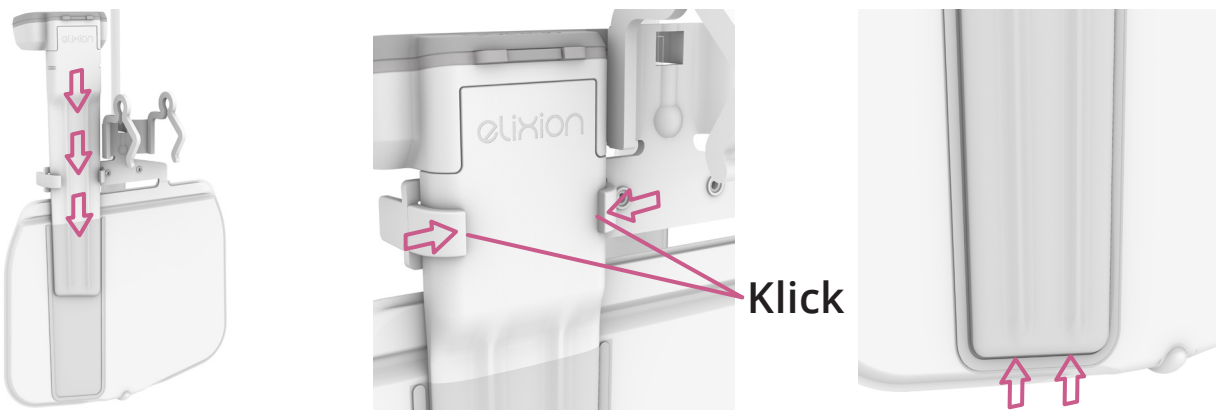

2 EINSCHALTEN


2.1 Einschalttaste drücken



2.2 Selbsttest wird durchgeführt
(LEDs & Lautsprecher prüfen)



2.3 Betriebsmodus „Netzwerk“ auswählen
(für „Autonomer Modus“ siehe E.)

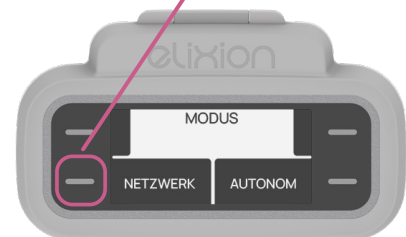

3 AM IoT-HUB ANMELDEN

3.1 Am Computer / Laptop den Browser öffnen
und den Link zum Elixion IoT-Hub aufrufen

3.2 Zugangsdaten eingeben

4 NEUEN BEOBACHTUNGSAUFRAG ANLEGEN

4.1 Auf „Beobachtungsauftrag erstellen“ klicken

4.2 Im Dialog rechts die Pflichtfeld ausfüllen


4.3 Auf „ERSTELLEN“ klicken

4.4 Ansicht wechselt automatisch zu
Beobachtungsauftrag.


Hinweis: Alternativ kann auch ein bereits bestehender Auftrag im Reiter „Neue Aufträge“ ausgewählt und im Schritt 5.1 eingerichtet werden.

5 BEOBACHTUNGSAUFTRAG EINRICHTEN


5.1 Auf „Beobachtung einrichten“ klicken

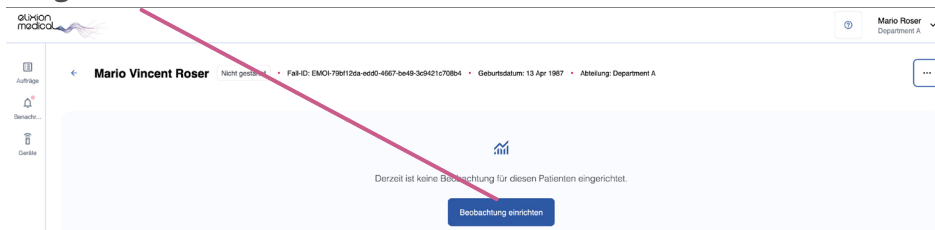


5.2 Im Dialog „1.Gerät zuweisen“ das Gerät auswählen und auf „Weiter“ klicken

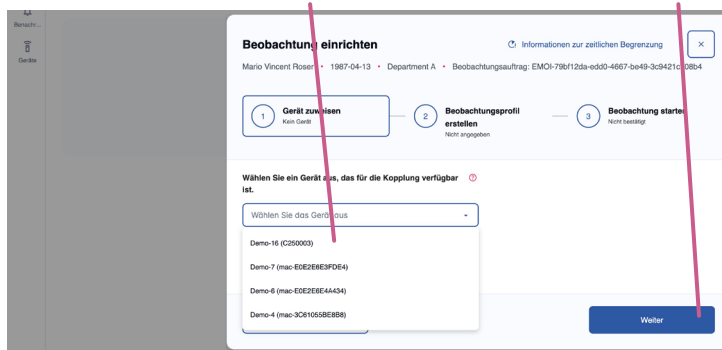


5.3 Im Dialog „2.Beobachtungsprofil erstellen“ das Beobachtungsprofil auswählen & ggf. anpassen, insbesondere auf das eingestellte Beobachtungsintervall achten

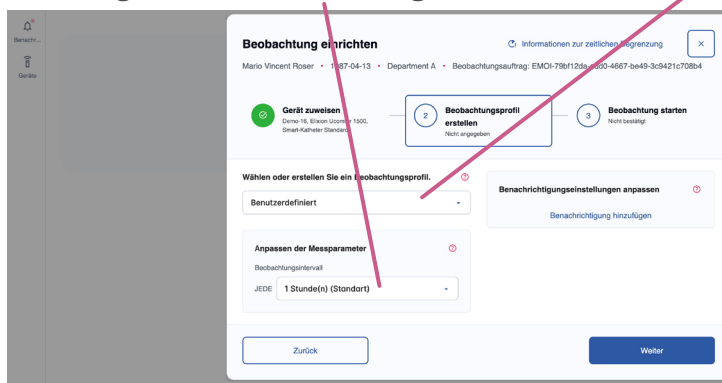

5.4 Im Dialog „3. Beobachtung starten“ die Einstellung überprüfen und mit „Fertig“ bestätigen

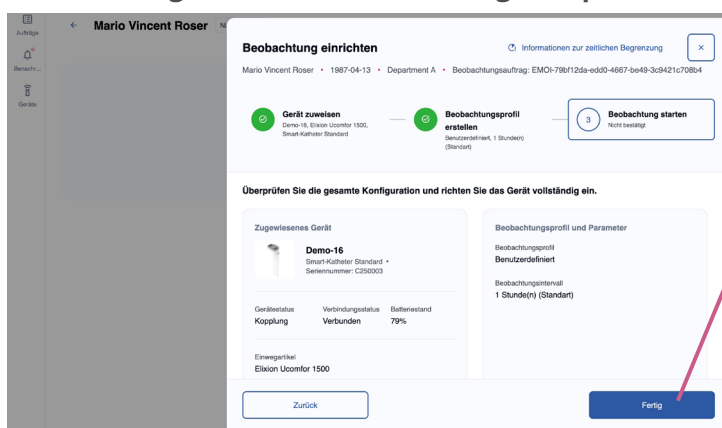


5.5 Beobachtungsauftrag ist eingerichtet

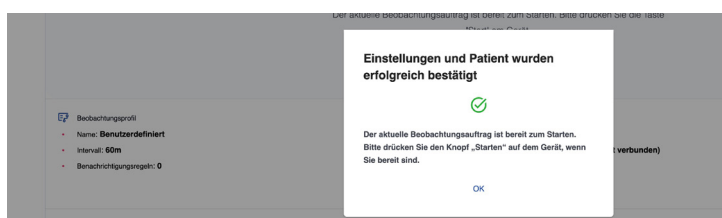


6 BEFESTIGUNG AM PATIENTENBETT


Haltehaken gespreizt & dicker Bettholm

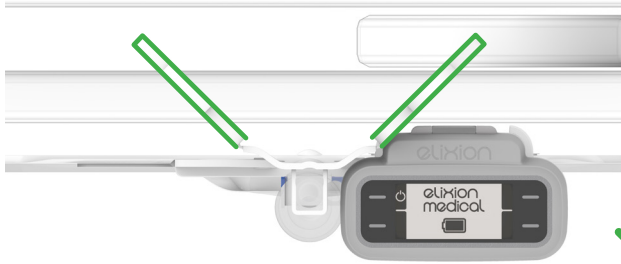


Beutel nicht komprimiert

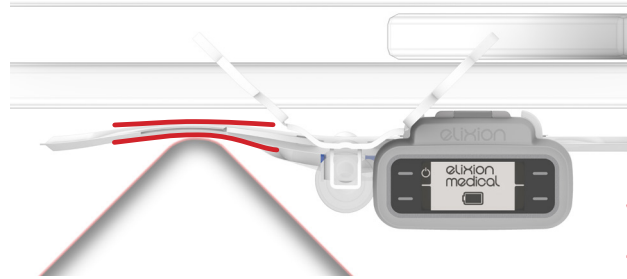

Senkrecht & stabil aufgehängt

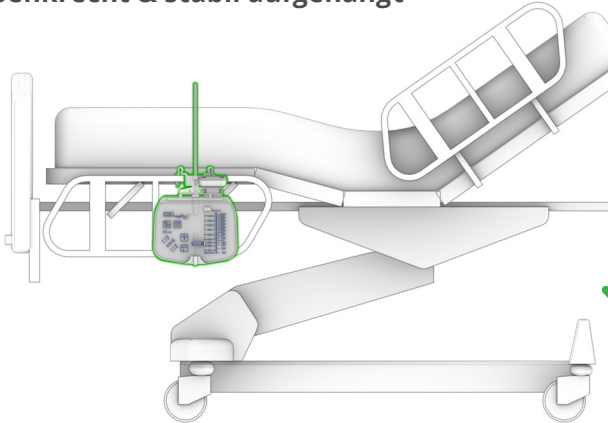


Unter Blasenniveau & frei hängend

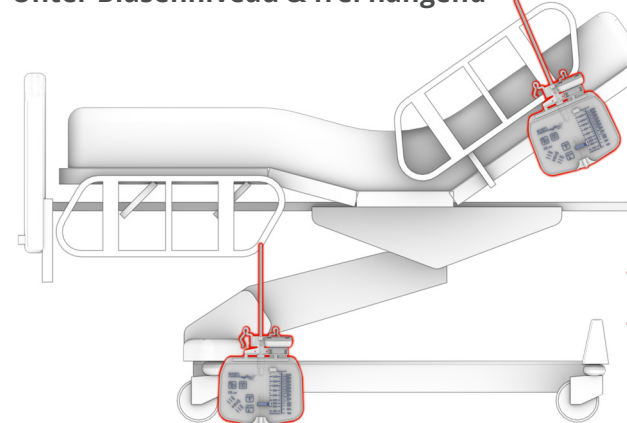

7 BEOBACHTUNG STARTEN

7.1 Patienten Fallnummer überprüfen


7.2 Auftrag bestätigen oder abbrechen

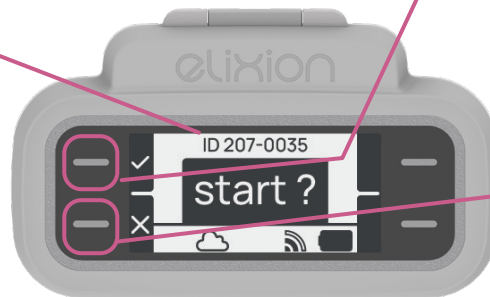

8 LAUFENDE BEOBACHTUNG

Ausgewähltes Beobachtungsintervall

Fortschrittsbalken als relative Zeitangabe im aktiver Beobachtung Intervall

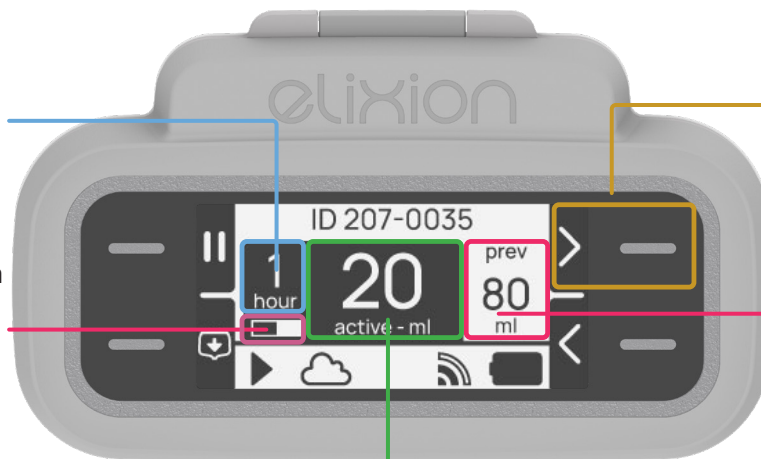

Gehen Sie zum Containervolumen-Bildschirm

Vorheriges Beobachtungsintervallvolumen

Aktives Beobachtungsintervallvolumen

A | BEUTEL ENTLEEREN


A.1 Beutel entleeren Taste drücken



A.2 Referenz Messung abwarten



A.3 Beutel vollständig entleeren und bestätigen

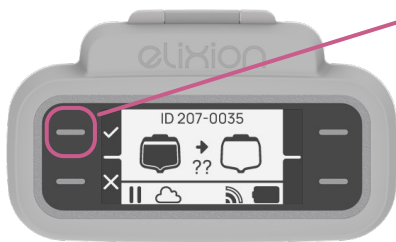

A.4 Referenz Messung abwarten



B | BEOBACHTUNG PAUSIEREN / BEENDEN

B.1 Pause Taste drücken



B.2 Stop Taste zum Ausschalten drücken



C | TASTENSPERRE

C.1 Untere beiden Tasten für 3 Sekunden gedrückt halten um Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren.



D | GERÄT NEU STARTEN

D.1 Obere linke und untere rechte Tasten für 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät neu zu starten.



E | AUTONOMER MODUS OHNE NETZWERKVERBINDUNG

E.1 Im Schritt 2.3 Betriebsmodus „Autonom“ auswählen

E.2 Beobachtungsintervall auswählen

E.3 Schritte 3. bis 5. überspringen und bei Schritt 6 fortfahren

F | ALARMMANAGEMENT

- Alarmer durch Druck auf Haken oder durchgestrichene Glocke quittieren
- Es kann bis zu 5 Minuten dauern bis ein Alarm verschwindet, nachdem die Ursache des Alarms behoben wurde



Diese Kurzanleitung bezieht sich auf das Elixion Niviu System, welches gemäß Artikel 22 MDR CE-markierte Medizinprodukte mit anderen Produkten kombiniert. **Version 1.0**



Elixion Medical GmbH
Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf



+49(0)1734986619
info@elixionmedical.com
<https://elixionmedical.com/>